

Kissen zur Seitenlagerung von Hüft-Patienten



Produktbeschreibung

Dieses Kissen ist eine Neuentwicklung und wurde für Patienten mit Hüftproblemen entwickelt. Sie können sich damit selbständig und ohne Gefahr einer Fehlpositionierung in der Hüfte auf die Seite drehen. Besonders die Beinhaltung in Seitenlage nach einer Hüft-TEP-Operation wird damit reguliert. Das Zusammenspiel von Form und Material ermöglicht es dem Patienten, ohne Schmerzen und ohne die Gefahr einer Hüftluxation eine stabile Seitenlage einzunehmen.

Als weiterer Vorteil ist zu erwarten, dass die Möglichkeit, sich selbständig vom Rücken auf die Seite zu drehen, dem Patienten den längeren Aufenthalt im Bett erheblich erleichtert. Erholsamerer Schlaf und weniger Rückenbeschwerden werden seine Genesung beschleunigen.


Gebrauchsanleitung

1. Kissen anbringen

- a. Legen Sie sich auf den Rücken, spreizen Sie die Beine leicht und winkeln Sie das gesunde Bein etwas an.
- b. Nehmen Sie den ‚Seitenschläfer‘ zwischen die Beine.

Die **schmale Seite** des trapezförmigen ‚Seitenschläfers‘ wird körpernah, die **breitere Seite** fußwärts ausgerichtet. **Das Schild**, welches bei Seitenlage das Umkippen in die Bauchlage verhindert zeigt nach oben, eine Seite des **Klettbandes** verläuft unter Ihrem Schenkel.


- c. Schliessen Sie das Klettband angenehm straff. Sie können den ‚Seitenschläfer‘ wahlweise mit beiden Klettverschlüssen verwenden oder aber nur auf der Seite des nicht operierten Beines.
- d. Das Kissen sollte so nah wie möglich am Körper sitzen.

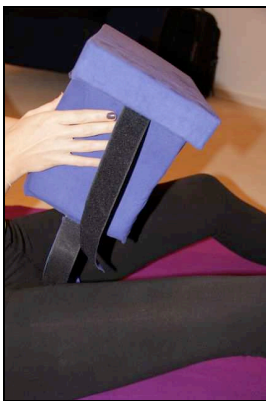

Kissen zwischen die Beine nehmen



Schmale Seite körpernah

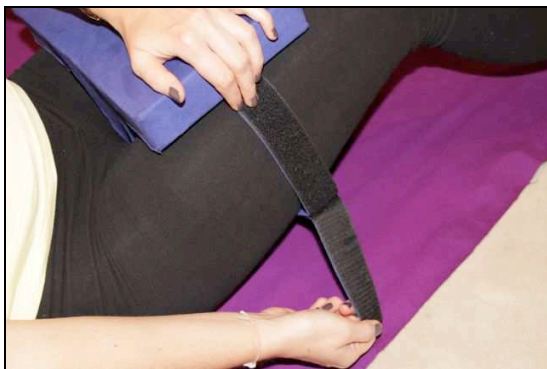

Schliessen des Klettbandes

2. Seitenlage

- a. Möchten Sie sich auf die Seite legen, dann drehen Sie sich über die nicht operierte Hüfte. Das operierte Bein liegt also oben.
- b. Das Schild sollte nun mit der Liegefläche einen rechten Winkel bilden, andernfalls müssen Sie eine andere Größe des Seitenschläfer Kissens verwenden.
- c. Nun sollten Sie in einer stabilen Seitenposition liegen, ohne der Gefahr ausgesetzt zu sein mit Ihrem operierten Bein in eine gefährliche Fehlstellung zu gelangen.

Je nach Härtegrad der Liegefläche kann die Funktionalität des ‚Seitenschläfers‘ eingeschränkt sein.

- d. Falls es für Sie bequemer ist, können Sie ein weiches Kissen zwischen die Unterschenkel legen.



Seitenlage von vorne



Seitenlage von der Seite

3. Rückdrehung

- a. Drehen Sie sich über das gesunde Bein zurück
- b. Behalten Sie das operierte Bein während der Drehung eng am Kissen.



Rückenlage

Achtung!

- Heben Sie das operierte Bein **nie** über das feste Schild
- Stehen Sie nicht mit dem fixierten Kissen zwischen Ihren Beinen auf
- Der Gebrauch ist eigenverantwortlich, es wird keine Haftung übernommen

Beurteilungs-Bogen

Vielen Dank, dass Sie uns in der Weiterentwicklung dieses Seitenschläfer Kissens unterstützen und nachfolgende Fragen beantworten.

1. Ist dieser ‚Seitenschläfer‘ für Sie ein nützliches Hilfsmittel zur Positionsänderung?
 - ja, _____
 - nicht unbedingt, _____

2. Fühlen Sie sich sicher wenn Sie beim Ruhen den ‚Seitenschläfer‘ verwenden?
 - sehr sicher
 - sicher
 - unsicher

3. Wie gut gelingt Ihnen das Drehen auf die Seite und wieder zurück auf den Rücken?
 - einfach
 - unsicher
 - schwer

4. Wie kommen Sie mit dem Verschlussmechanismus zurecht?
 - einfach
 - mit Mühe
 - schwer

5. Benützen Sie ein zusätzliches Kissen zwischen den Unterschenkeln?
 - immer
 - gelegentlich
 - nie

6. Haben Sie Verbesserungsvorschläge? Wir sind gespannt!
 - Größe: _____
 - Material: _____
 - Verschluß: _____

7. Zusätzliche Anmerkungen

Herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Meinung zu diesem neuen Produkt mitteilen.

Sie können diesen Beurteilungs-Bogen via Post, Zusammengefasst in einer E-Mail oder auch sehr gerne telefonisch an uns kommunizieren.



Wir sind Geschwister aus dem Süden Deutschlands und haben dieses Kissen entwickelt, da wir selbst schon einmal in einer ähnlichen Lage waren wie Sie. Durch unsere unterschiedliche berufliche Ausrichtung konnten wir unsere „Prototypen“ für Sie gemeinsam weiterentwickeln. Wir hoffen, dass wir Ihnen damit die Seitenlage nach einer Hüftprothesen-Implantation erleichtern und Ihre Genesung beschleunigen konnten.



Dr. Anne Pieper
Orthopädin Spezialgebiet Endoprothetik

2008 Hüft-TEP nach Kiteboardunfall

Tel.: +49 15773949171

Mail: mail@annepieper.com

Homepage: www.annepieper.com



Dipl.-Ing. Moritz Pieper
Forschung & Entwicklung Leichtbau

2006 Hüftpfannenbruch nach
Snowboardunfall

Tel.: +49 1774040034

Mail: moritzpieper@hotmail.com

Anschrift:
Moritz Pieper
Konrad-Witz-Str. 42
78628 Rottweil